

DryMax Foam Fallstudie - bensår

Sårets bakgrund

- Venösa bensår på 89-årig kvinna med reumatisk bakgrundssjukdom samt diabetes typ II.
- Kvinnan har levt med såren i 20 år utan att komma till läkning och hennes livskvalitet har påverkats negativt under den långa perioden.
- Svårt att få kontroll över sårvätskan som läckte på kläder, lindor och lakan.
- Såren hade fastnat i inflammationsfasen.
- Frustrerad vårdgivare som känt sig otillräcklig.



Sårbehandling med DryMax Foam



Såren är i inflammationsfasen och vätskar mycket.
DryMax Extra Soft sätts in som primärförband vid behandlingsstart.
Förbandet byts två gånger per vecka.



Mängden sårvätska avtar och såren går över i nybildningsfas.
DryMax Foam sätts in som primärförband och byts en gång i veckan.

Sårömläggning behandlingsdag 81 - före och efter debridering och rengöring



Före debridering och rengöring av såren



Efter debridering och rengöring av såren

Delar av vårdgivarens arbete vid sårbehandlingstillfället



Förberedelser inför sårbehandlingen



Materialet dukas fram



Patientens sår sköljs och rengörs

Resultat av behandling med DryMax Extra Soft under inflammationsfasen och DryMax Foam under nybildningsfasen



Dag 0
Behandling startades med DryMax Extra Soft



Dag 7
Behandlingen övergår till DryMax Foam



Dag 98
Såren närmar sig läkning