

## Applikationsexempel för DryMax sårförband 37x56 cm

Stora, följsamma och superabsorberande förband för vätskande sår. Förbanden har en enkel design med absorption från båda sidor vilket omöjliggör felanvändning. Förbanden känns torra och behagliga för patienteten samtidigt som de bidrar till en fuktig sår läkningsmiljö. Dess supertunna och mjuka egenskaper gör att de passar på alla platser på kroppen.

DryMax-förbanden absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration (uppluckrad hud) samtidigt som en fuktig sår läkningsmiljö bibehålls. De är utvecklade för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.

Artikel	REF	Sterilt?	Avd.fp	Produktstorlek (cm)	Absorptionskapacitet*
DryMax Soft	F60019/10	Ja	10	37x56 cm	3000 ml
DryMax Non Sterile	F20071/10	Nej	10	37x56 cm	1600 ml

\*) Enligt internationell standard EN 13726

### Ben



1. Placera förbandet under benet.



2. Vik in förbandet från båda sidorna vid fotknölen så att foten täcks.



3. Fortsätt att vika upp förbandet runt hela benet.



4. Se till att sårområdet är täckt. Använd tejp för att hålla den vikta stövelformen på plats.



5. Trä en tubgas som en strumpa över förbandet.



6. Förbandet sitter på plats.

### Arm



1. Placera förbandet i runt armen så att sårområdet är täckt.



2. Fixera förbandet genom att trä en tubgaslinda över armen.



3. Förbandet sitter på plats.

## Ljumske, lår och höft



1. Placera förbandet runt låret eller höften så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppen.



2. Klipp ett snitt till mitten i en tubgas. Trä på tubgasen som en byxa.




3. Förbandet sitter på plats.

## Bröst



1. Placera förbandet över bröstet så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.

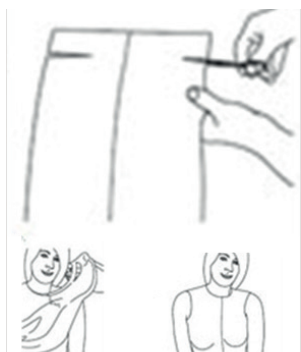

2. Klipp ett snitt på var sin sida i en tubgas som håll för armarna. \*\*  
Trä på tubgasen som en tröja över förbandet.



3. Förbandet sitter på plats.

## Rygg



1. Placera förbandet över ryggen så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.



2. Klipp ett snitt på var sin sida i en tubgas som håll för armarna. \*\*  
Trä på tubgasen som en tröja över förbandet.



3. Förbandet sitter på plats.

## Buk



1. Placera förbandet över buken så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.



2. Klipp ett snitt på var sin sida i en tubgas som håll för armarna. \*\*  
Trä på tubgasen som en tröja över förbandet.



3. Förbandet sitter på plats.

\*\*\*) Exempel från Mölnlycke Tubifast