

DryMax Easy

DryMax Easy är ett sterilt, följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. DryMax Easy absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sårhelingsmiljö bibehålls.

DryMax Easy har en smart vidhäftningsfunktion som fäster förbandet lätt på huden och fungerar som en extra hand vid såromläggningen. Förbandet har en enkel design med absorption från båda sidor vilket omöjliggör felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptionskapacitet skulle krävas. Den sömlösa designen förenklar positionering av förbandet på såret.


Förbandet känns torrt och behagligt för patienteten samtidigt som det bidrar till en fuktig sårhelingsmiljö. Den hydrofila kontaktytan transporterar effektivt vätskan bort från såret och fördelar den jämnt in i förbandets kärna, DryMax technology core.

Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. DryMax Easy är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.


Applikationsguide



Förbandet placeras i nära kontakt med såret eller i kontakt med ett annat förband.

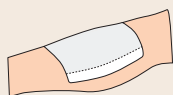

Fixera förbandet på lämpligt sätt med bandagelinda, film eller tejp.

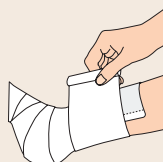

DryMax Easy kan användas tillsammans med kompressionsbehandling.

Artikel	Förbandsstl i cm	REF	Ant/fp	Absorptionskapacitet*
DryMax Easy	10x10	F60033/10	10	170 ml
DryMax Easy	10x20	F60035/10	10	500 ml
DryMax Easy	20x20	F60036/10	10	1000 ml
DryMax Easy	20x30	F60037/10	10	1550 ml

*Enligt internationell standard EN 13726



- **Kostnadseffektiv**
- **Användarvänlig**
- **Ökad patientkomfort**
- **Förbättrad sårhelning***

*Jämfört med konventionella sårforband



DryMax® technology