

Vikningsguide

DryMax Soft ett superabsorberande förband för vätskande sår



Tår och fingrar




1 Vik förbandet 5x5 cm på hälften.



2 Placera förbandet mellan tårna eller fingrarna.

Häl och armbåge

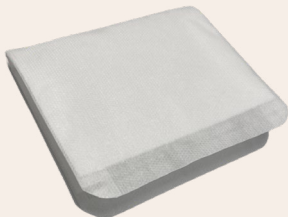

1 Vik förbandet 10x20 cm i mitten på bredden.



2 Vik de två övre hörnen inåt. Placera tejp för att hålla de vikta hörnen på plats.



3 Öppna upp det vikta förbandet.



4 Placera förbandet på hälen eller armbågen.

Ben



- 1** Placera förbandet 37x56 cm under benet.



- 2** Vik in förbandet från båda sidorna vid fotknölen så att foten täcks.



- 3** Fortsätt att vika upp förbandet runt hela benet. Se till att sårområdet är täckt. Använd tejp för att hålla den vikta stövelformen på plats.



- 4** Trä ett tubbandage som en strumpa över förbandet.



- 5** Förbandet sitter på plats.

Arm



- 1** Placera förbandet 37x56 cm runt armen så att sårområdet är täckt.



- 2** Fixera förbandet genom att trä ett tubbandage över armen.



- 3** Förbandet sitter på plats.

Bröst



- 1** Placera förbandet 37x56 cm över bröstet så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.

- 2** Klipp ett snitt på var sin sida i ett tubbandage som hål för armarna.* Trä på tubbandaget som en tröja över förbandet. Förbandet sitter på plats.

***Klipp endast i tubbandaget och inte i förbandet!**

Buk



- 1** Placera förbandet 37x56 cm över buken så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.

- 2** Klipp ett snitt på var sin sida i ett tubbandage som hål för armarna.* Trä på tubbandaget som en tröja över förbandet. Förbandet sitter på plats.

***Klipp endast i tubbandaget och inte i förbandet!**

Rygg



- 1** Placera förbandet 37x56 cm över ryggen så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppens konturer.

- 2** Klipp ett snitt på var sin sida i ett tubbandage som hål för armarna.* Trä på tubbandaget som en tröja över förbandet. Förbandet sitter på plats.

***Klipp endast i tubbandaget och inte i förbandet!**

Ljumske, lår och höft



- 1** Placera förbandet 37x56 cm runt låret eller höften så att sårområdet är täckt. Vid behov viks och anpassas förbandet till kroppen.



- 2** Klipp ett snitt till mitten i ett tubbandage.* Trä på tubbandaget som en byxa. Förbandet sitter på plats.

***Klipp endast i tubbandaget och inte i förbandet!**

Beställningsinformation

Artikel	Förbandsstl i cm	REF	Ant/fp	Absorptionskapacitet*
DryMax Soft	5x5	F60125/10	10	20 ml
DryMax Soft	7.5x7.5	F60011/10	10	60 ml
DryMax Soft	10x10	F60013/10	10	130 ml
DryMax Soft	12.5x12.5	F60123/10	10	220 ml
DryMax Soft	10x15	F60012/10	10	300 ml
DryMax Soft	10x20	F60015/10	10	330 ml
DryMax Soft	15x20	F60014/10	10	400 ml
DryMax Soft	20x20	F60016/10	10	600 ml
DryMax Soft	20x25	F60018/10	10	780 ml
DryMax Soft	20x30	F60017/10	10	960 ml
DryMax Soft	20x40	F60124/10	10	1300 ml
DryMax Soft	37x56	F60019/10	10	3000 ml

*Enligt internationell standard EN 13726

VI FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG!

kicki.hasselgren@absorbest.se

+46 768 81 10 07

absorbest.se



BESTÄLL KOSTNADSFRIA PROVER!

Upplev skillnaden och jämför resultatet med vårt superabsorberande förband DryMax Soft

